

安全使用注意事项

- 请在医院等地方，接受医生、理疗师、专家的建议。



注意

此标志表示，如无视该标记，进行误操作，可能会导致受伤及物品损坏。

- 请选择适合自己体形的拐杖。
- 使用前请对各部位进行检查。
- 杖头橡胶垫如果发生破裂、磨损等异常时，请马上更换。
- 请确认支柱管(伸缩管)确实被固定好。
- 各部位出现破损、松动等问题时，请不要使用，与销售店等询问、协商。
- 拐杖发生弯曲时，请不要使用，与销售店等询问、协商。
(请不要将弯曲了的拐杖拉直后使用。)
- 在易滑路面等地方使用时，请务必充分注意。
- 使用时请务必将拐杖的脚部四点着地。
(特别是在楼梯、高低不平、倾斜面等处的四点着地，请注意支持面的倾斜角度。)

保管方法

请不要在下列场所保管，否则，会成为导致橡胶等部件老化的原因。

- 日光直射的场所
- 火炉前、汽车内等高温场所
- 被雨淋及湿度大的场所

保修

保修期限为购买之日起一年以内。

但是下列情况即使在保修期间，也视为有偿修理。

- 由于火灾、天灾引起的故障、损伤。
- 由于违反使用说明书的使用方法、注意事项而引起的故障。
- 随意变更规格及擅自改造所引发的故障。
- 杖头橡胶垫等磨损品及各部位由于老化产生的故障、损伤。

保修卡

商品名		购买日期	
购买者地址:			
姓名:		电话:	
销售店	地址:		
	店名:		
	TEL:		
	负责人:		
			盖章

制造商




松永福利器具制造(上海)有限公司
地址:上海市金山区亭林镇林盛路328号
TEL:(021)67230103 FAX:(021)57238937

< 四点杖 使用说明书 >



非常感谢您购买松永公司的四点杖。
 为了让您安全正确的使用本产品，请在使用前认真阅读使用说明书。
 本说明书内附保修卡，请仔细保管避免遗失。

各部位名称

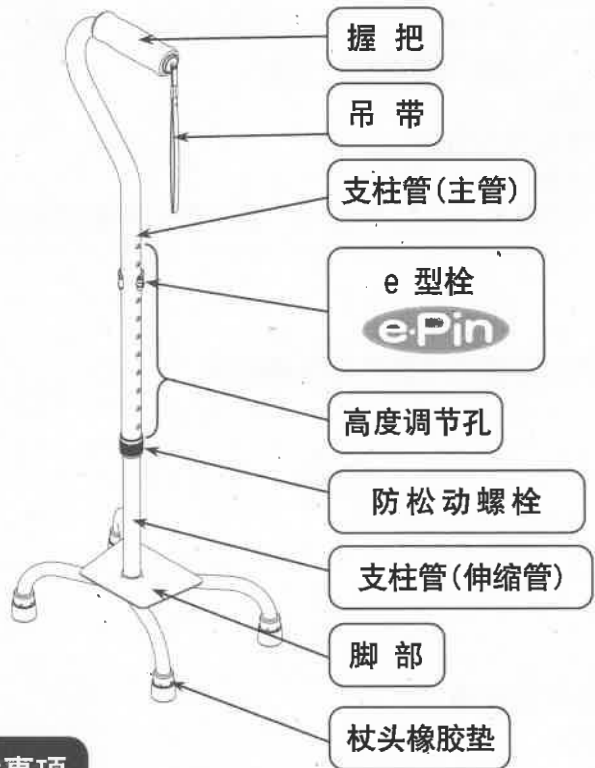

使用前注意事项

- ◎ **拐杖长度正确选择方法**
 将拐杖头部放在同侧腿部前外侧20cm处，再将手的肘部弯曲30~40度的位置。请在该状态下决定拐杖长度。
- ◎ **长度调节方法**
 - 拧松防松动螺钉。
 - 取下e型栓。
 - 拉动支柱管(伸缩管)调节长度，对准调节孔的位置。
 (支柱管旋转180度，可左右转换。)
 - 插入装上e型栓。
 - 拧紧防松动螺钉。



⚠ 注意 ● 请务必确认e型栓确实插入锁定。否则，拐杖会突然缩短，有摔倒、受伤的危险。