

安全使用注意事项

- 请在医院等地方，接受医生、理疗师、专家的建议。

注意

此标志表示，如无视该标记，进行误操作，可能导致人身伤害及物品的损坏。

- 请选用适合自己体形的拐杖。
- 使用前请对各个部位进行检查。
- 杖头橡胶垫如发生破裂、磨损等异常，请立即更换。
- 请确认支撑管（伸缩管架）确实被固定好。
- 当各部位出现破损、松动等问题时，请不要使用，与销售店等联系询问。
- 拐杖发生弯曲时，请不要使用，与销售店等联系询问。（请不要将弯曲了的拐杖拉直使用。）
- 在易滑路面等地方使用时，请务必小心谨慎。

保管方法

请不要在下列场所保管。否则，会导致橡胶等部件的老化。


- 日光直射的场所
- 火炉前、汽车内等高温场所
- 被雨淋、湿气大的场所

保修

保修期限为购买之日起一年以内。

但是下述情况即使在保修期间，也视为有偿修理


- 由于火灾、天灾引起的故障、损伤。
- 使用时违反使用说明书的使用方法、注意事项所引发的故障。
- 随意变更规格及擅自改造所引发的故障。
- 杖头橡胶垫等消耗品及各部位由于老化产生故障、损伤。

 松永福利器具制造（上海）有限公司 MAITSUNAGA	
住 所：	上海市金山区亭林镇林盛路328号
生产地址：	上海市金山区亭林镇林盛路328号 325号、268号
产品备案号：	沪金械备20160002号
生产许可证号：	沪食药监械生产许20041070号
产品标准：	GB/T19545.1-2012
生产日期：	见产品标签
使用期限：	4年
联系/售后服务电话：	021-57235229, 021-67230103
真 址：	021-57238937
网 址：	http://www.maitsunaga-sh.com.cn

肘拐杖

非常感谢您购买松永公司的肘杖、斜撑杖。为了让您安全正确的使用本产品，请在使用前认真阅读使用说明书。说明书内附保修卡，请仔细保管避免遗失。

各部位名称

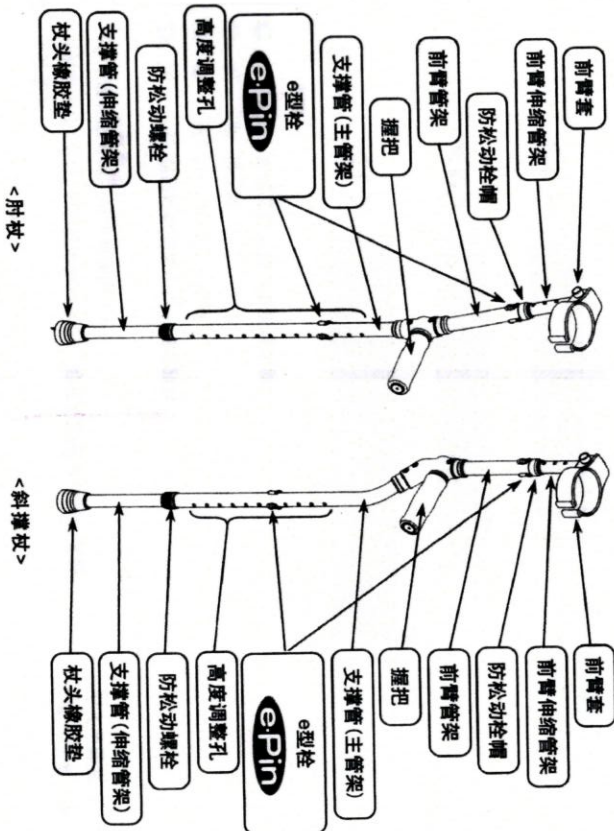


保修卡


商品名	购买日期
购买者地址:	
姓名:	电话:
地址:	
店名:	
TEL:	
销售店	
负责人:	

使用前注意事项(调节方法)

- e型栓的使用方法

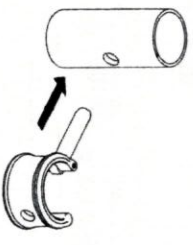

对准管架孔
将销栓插入。

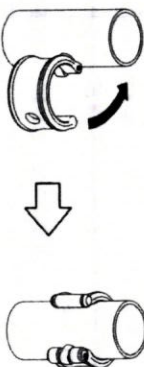

插到底部后，旋转
e型栓。

确认销栓头部从另一侧的孔里伸出。

制造商




松永福利器具制造(上海)有限公司
地址:上海市金山区亭林镇林盛路328号
TEL:(021)67230103 FAX:(021)57238937

使用前注意事项 (调节方法)

标准方法

以下是一般(标准)调节方法。请在医院等地方，接受医生、理疗师、专家的建议后再进行调整。

- 将握把如图所示朝向前方。
- 将拐杖头部放在同侧腿部前外侧20cm处，肘部弯曲30~40度。在该握姿状态下决定拐杖长度。
- 请将前臂套套在手腕与肘部的中间附近。(置于不妨碍肘部弯曲的位置。)

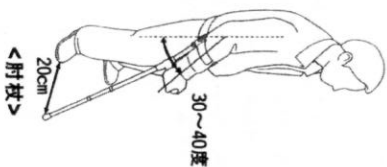

长度调节方法

- 握把的调节
 - 拧松防松动螺栓。
 - 取下e型栓。
 - 拉动支撑管(伸缩管架)调节长度，并对准调节孔的位置。
 - 插入装好e型栓。
 - 拧紧防松动螺栓。
- 前臂套的调节
 - 取下e型栓。
 - 拉动前臂伸缩管架调节长度，并对准调节孔的位置。(防松动盖错位时，请将其复位到前臂管架的前端。)
 - 插入装好e型栓。



注意

请务必确认e型栓是否确实伸入到位。否则，拐杖可能突然缩短，有摔倒、受伤的危险。

选配件



● 安装该选配件时，请接受医生、理疗师、专家的建议，并得到同意。

前臂套

前臂套大小(内径)与前臂不合适时，可以只更换前臂套。

◎ 尺寸：备有L、M、S、SS四种。


尺寸	< L >	< M >	< S >	< SS >
直径	90mm	70mm	65mm	55mm



前臂套垫

前臂套大小(内径)与前臂间隙过大时，可使用前臂套垫进行调整。(个人自行安装时，请参照图示尺寸)

- ◎ 尺寸：对应前臂套有L、M、S、SS四种。
- ◎ 厚度：5mm和10mm两种
- ◎ 材质：聚乙烯
- ◎ 安装方法：用两面胶带贴住前臂套内侧。

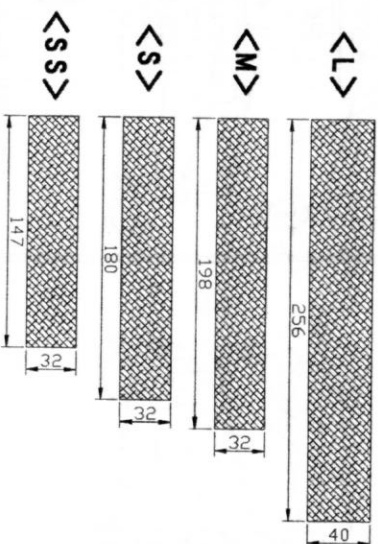

注意

安装选配件使用时，跌倒后有受伤的危险。请充分注意，小心使用。